

臨床データ

1. 採取した548個の検体を分析し、COVID-19 抗原検査キットの臨床性能を以下のように確認されました。

		SARS-CoV-2 PCR		総計	PPV	NPV
		陽性	陰性			
COVID-19 抗原検査 キット	陽性	185	0	185	100. 00%	99. 45%
	陰性	2	361	363		
総計		187	361	548		
感度		98. 93% (95% CI= 93. 29% ~ 99. 34%)				
特異度		100. 00% (95% CI= 98. 97% ~ 100. 00%)				
全体一致率		99. 47% (95% CI= 97. 63% ~ 99. 60%)				

COVID-19 抗原検査キットの感度は98. 93%(95%CI=93. 29%~99. 34%) で、特異度は100. 00%(95%CI=98. 97%~100. 00%) で、全体一致率は99. 47%(95%CI=97. 63%~99. 60%) です。